


HYDRO BOMBA DE VACÍO

MANUAL DE USO

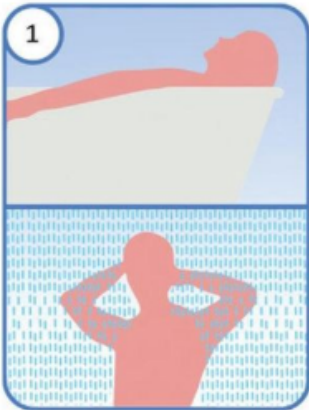

1.- Tome un ligero aseo personal.



2.- Inserta el muelle de la bomba en el área correspondiente, debe coincidir la parte que esta inclinada con la del muelle



3.-Gíralo si es necesario



4.- Voltee la bomba y llénela de agua, debe quedar ligeramente por debajo del muelle.



5.- Colóquela en su pene.



6.-Presione la bomba contra su pelvis, notara que sale agua por la válvula, esto es completamente normal, ya que está generando la presión en su pene.



7.- Complete su ducha mientras usa bomba, colóquele la correa para que sea más simple su sujeción mientras se ducha.



8.- Realice 3 sesiones por 5 minutos cada una para no generar lesiones o moretones en su pene.



9.-Para liberar la presión solo jale la válvula o hágala hacia un lado, de esa manera saldrá el agua y la presión de la bomba



VIDEOS

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se usan los anillos retardadores o para que sirven?

R. Estos anillos se usan una vez que termino de hacer sus ejercicios con la bomba, deberá colocarlo sobre su pene erecto y la finalidad es hacer que la erección se prolongue por mas tiempo

¿Por que no logro hacer una correcta succión con la bomba?

R. Esto se debe a falta de presión de la bomba contra su miembro, le recomendamos que si es muy molesto use un poco de agua caliente en el muelle de la bomba para que el mismo se afloje un poco y sea menos difícil presionar la bomba contra su pelvis